



Modalità di invio dei campioni

Esame necroscopico

Prima del conferimento è preferibile **contattare il Servizio di Anatomia Patologica (366 822 2580)**. Se necessario, verranno fornite indicazioni su aziende private che possano occuparsi del trasporto dell'animale presso la nostra sede. Per motivi sanitari, al termine dell'esame necroscopico **il corpo non potrà essere restituito** direttamente al proprietario; è possibile tuttavia rivolgersi a ditte autorizzate per la cremazione.

Al momento dell'arrivo presso la nostra struttura, è necessario recarsi presso il **Punto Accettazione Centralizzato dell'Ospedale Veterinario Universitario** per la registrazione; in seguito sarà possibile conferire l'animale presso la Sala Anatomica di Anatomia Patologica.

Esame istopatologico

Il conferimento dei campioni (diretto o a mezzo corriere a carico del Committente) deve avvenire presso il **Punto Accettazione Centralizzato dell'Ospedale Veterinario Universitario**. I preparati devono essere accompagnati dall'apposito **modulo**, adeguatamente compilato.

I campioni possono pervenire al Punto Accettazione:

- Come **tessuti fissati in formalina** tamponata al 10%
All'interno di un vasetto di plastica a chiusura ermetica, con rapporto di 10 parti di formalina per unità di volume di campione, per ottenere un'adeguata fissazione. Per permettere eventuali approfondimenti immunoistochimici è opportuno che la permanenza nel fissativo non superi complessivamente i 2-5 giorni.
- Come **preparati istologici già allestiti** presso altri laboratori nel caso di richiesta di seconda opinione

Esame citologico

Il conferimento dei campioni (diretto o a mezzo corriere a carico del Committente) deve avvenire presso il **Punto Accettazione Centralizzato dell'Ospedale Veterinario Universitario**. I preparati devono essere accompagnati dall'apposito **modulo**, adeguatamente compilato.

I campioni possono pervenire al Punto Accettazione:

- Come **preparati già allestiti**, già colorati o (preferibilmente) da colorare
Ciascun vetrino deve essere identificato e deve essere evidenziato il lato su cui è presente il materiale; nel caso si inviassero vetrini già colorati, specificare il tipo di colorazione; i vetrini devono essere adeguatamente imballati e protetti.
Si raccomanda di NON fissare vetrini non colorati e NON mettere a contatto i vetrini, neanche indirettamente, con formalina.
- Come **liquido patologico da allestire**
Il materiale deve essere conservato in una provetta per emocromo con K3EDTA, adeguatamente imballata, e mantenuto refrigerato a +4°C; se possibile, inviare assieme alla provetta anche 1-2 strisci dal liquido intero.

In caso di invio dei campioni tramite corriere, seguirà regolare fattura con allegato modulo MAV per il pagamento "vista fattura". Il referto verrà inviato a pagamento avvenuto. A questo proposito si raccomanda di compilare con attenzione la parte relativa ai dati per la fatturazione sul modulo di accompagnamento.

Punto Accettazione Centralizzato

Ospedale Veterinario Universitario

Lunedì-venerdì: 9:00 - 17:30

Via Tolara di Sopra, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

Tel. **051 2097546**

Per informazioni specifiche riguardo le prestazioni offerte e il conferimento dei campioni, contattare direttamente il

Servizio di Anatomia Patologica:

Tel. **366 822 2580**